



**T.C.  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  
VETERİNER FAKÜLTESİ  
ANALİZ ve TEŞHİS LABORATUVARI  
PATOLOJİ BÖLÜMÜ**

**Patolojik Numene Göndermek İçin Açıklamalar**

1. [Patoloji Talep Formu](#)'nu doldurup kargo içine koyunuz. Talep formunun olası [formol sızmalarına](#) bağlı zarar görmesini önleme amacıyla lütfen ayrı kilitli poşetin içine koyduktan sonra kargo içine koyunuz.
2. Hasta, hasta sahibi, veteriner hekim ve klinik görünüm ile ilgili boşlukları mutlaka doldurunuz. Ayrıca hastanın anemnezini de ekleyiniz. Klinik diagnozda ne aradığınızı açıklayınız. Klinik bilgi ve Ön tanı patolojik değerlendirme açısından çok önemlidir. Yetersiz ve eksik klinik bilgi ayrıntılı ve spesifik değerlendirmenin yapılamamasına ve hatalı ya da yetersiz patolojik tanıya neden olabilir. Lütfen patolojik inceleme formunu dikkatlice doldurunuz. Operasyon materyali ya da biyopsinin nereden alındığını (anatomik bölge) tam olarak açıklayınız. Aynı hastadan birden fazla örnek alındıysa örnekleri ayırarak ve etiketlendirerek göndermeye dikkat ediniz. Total meme ya da birden fazla meme lobunun gönderiminde; meme loblarının ve etrafında bulunabilecek kitlelerin birbirine karışmaması için işaretlemelerde bulununuz.
3. %10'luk formaldehit solüsyonuna (1 hacim piyasada satılan saf formaldehit {%37'lik olarak satılır, bu saf kabul edilir} 9 hacim çeşme suyu) konulmuş örneğinizi sızma yapmayan kavanoz vb. kapta paketleyiniz. Sızdırmaya engel olmak için kavanozu sıkıca kapattığınızdan emin olunuz. Eger mümkünse, numene gönderdiğiniz bu kapları balonlu sargı ya da strafor veya uygun petlerle destekleyiniz.
4. Örneğiniz 7:1 oranında (7 hacim formaldehit solüsyonu, 1 hacim örnek) %10'luk formaldehitte fikse edilmelidir. Örnekler büyük hacimli ise 1-2 cm aralıklarla kesitler atarak formalinin örneğe nüfuzunu sağlayınız.
5. Yüksek miktarda formalinin nakledilmesi güçlük oluşturmaz. Lütfen 1 litreden az olmasına özen gösteriniz.
6. [Sitolojik inceleme](#) için gönderilen lamlara formol teması, bazı sitolojik boyaların yapılmasını engellemektedir. Eğer sitolojik bir örnek ile formol içinde biyopsi gönderecekseniz lütfen sitolojik lamları formolden izole edecek şekilde paketleyiniz.