



T. C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNER TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI

NUMUNE ALMA VE YOLLAMA İŞLEM AKIŞ ŞEMASI



### **NUMUNE KABULDE ARANILACAK GENEL ŞARTLAR**

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarına teşhis hizmetleri amacıyla doğru örnek gönderme işlemine başlamadan önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarı ile iletişime geçilmesi önerilir.

Teşhis ve analiz amacı ile gönderilen numune Veteriner Hekim tarafından uygun şartlar altında alınmalıdır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarına teşhis hizmetleri için resmi/tüzel kişiler tarafından gönderilen numuneler; **Laboratuvara Numune Gönderme Formu** ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Teşhis ve analiz amacı ile gönderilen numune, yeterli sayı ve miktarda olmalıdır. Teşhis ve analiz amacı ile gönderilen organ örnekleri teşhisi istenilen hastalık durumu ve görülen lezyonları temsil etmelidir.

Amaca uygun olarak seçilen örneklerin kokuşmamış olması ve laboratuvara uygun şartlarda (**SOĞUK ZİNCİRDE**) ulaştırılması gerekir. Numuneler mümkün olduğunca aseptik şartlar altında alınmalı, alınan numuneler arasında kros kontaminasyon olmamasına özen gösterilmelidir.

### **NUMUNE RED EDİLECEĞİ DURUMLAR**

Teşhis ve analiz amacı istenilen muayene/analiz için uygun örneklerin gönderilmemiş olması.

Teşhis ve analiz amacı ile gönderilen numune örneklerin istenilen analiz için uygun taşıma ortamında gönderilmemiş olması.

Teşhis ve analiz amacı ile gönderilen organ numuneleri kokuşma olması.

Hitopatolojik muayene için gelen organ ve numunelerinin dondurulmuş/dondurulmuş çözünmüş olması.

Laboratuvara Numune Gönderme Formunun doldurulmaması veya istenilen bilgilerinin yetersiz olması.

Ücretin ödenmemiş olması.

T. C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNER TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI

NUMUNE ALMA VE YOLLAMA İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

## TEŞHİS VE ANALİZİ İSTENEN ÖRNEĞİN ALINMA İŞLEMLERİ

1. Adım

- Teşhis ve analiz amacı ile numune gönderme işlemi için **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI** ile iletişime geçilir.

2. Adım

- Laboratuvara Numune Gönderme Formunda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulur.

3. Adım

- Teşhis ve analizi istenen örnek için; ilgili laboratuvar bölümünde yer alan örnek gönderme talimat kriterlerine göre örnekleme yapılır.
- Uygun şartlarda hazırlanan örnek kargoya verilir.

**TEŞHİS VE ANALİZİ İSTENEN ÖRNEĞİN  
VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARINA ULAŞMASI**

